

Utilice esta guía para conocer su medidor y siga los pasos descritos a continuación para poder comenzar.

IMPORTANTE: Lea el Manual del propietario que se suministró con su sistema.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

Después del uso y la exposición a la sangre, se considera que todas las partes de este kit implican un riesgo biológico. Un kit usado puede transmitir enfermedades infecciosas incluso después de que haya realizado la limpieza y la desinfección. Consulte el Manual del propietario para obtener información importante sobre la limpieza y la desinfección de su medidor, dispositivo de punción y tapa.

Para obtener más información, consulte: Aviso de Salud Pública de la FDA: "Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication 2010" <http://wayback.archive-it.org/7993/20170111013014/http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>. Sitio web del CDC sobre "Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration" <http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html>.

Uso recomendado

El sistema de supervisión de glucosa en la sangre OneTouch Verio Reflect® está compuesto por el medidor OneTouch Verio Reflect® y las tiras reactivas OneTouch Verio®. El sistema de supervisión de glucosa en la sangre OneTouch Verio Reflect® está diseñado para utilizarse en la medición cuantitativa de glucosa (azúcar) en muestras de sangre completa capilar recién extraída de la yema del dedo. El sistema de supervisión de glucosa en la sangre OneTouch Verio Reflect® está diseñado para autodiagnóstico fuera del cuerpo (uso para diagnóstico *in vitro*) por personas con diabetes en el hogar como ayuda para monitorear la eficacia del control de la diabetes.

El sistema está diseñado para ser utilizado por una sola persona y no debe compartirse. El sistema no debe utilizarse para el diagnóstico o la detección de la diabetes, ni en recién nacidos.

Limitaciones

El sistema de supervisión de glucosa en la sangre OneTouch Verio Reflect® está diseñado para ser utilizado por un solo paciente y no debe compartirse. **No** lo utilice en múltiples pacientes. El sistema no debería usarse como un sustituto del asesoramiento del profesional médico. Tampoco debe utilizarse para el diagnóstico o la detección de la diabetes, ni en recién nacidos.

El sistema OneTouch Verio Reflect® no debe utilizarse en pacientes con enfermedades graves, pacientes en estado de shock, pacientes muy deshidratados o pacientes en estado hiperosmolar (con o sin cetosis). **No** use el sistema OneTouch Verio Reflect® para realizar pruebas en lugares alternativos (AST). El sistema no está diseñado para utilizarse en entornos de cuidados intensivos.

CONSULTE SU MANUAL DEL PROPIETARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES DE USO.

Iconos del medidor

 Función **Bluetooth®** encendida

 Sincronización

 Resultado de la solución de control

 Batería baja

 Puntos de progreso de navegación de la pantalla

Consulte el Manual del propietario para conocer los símbolos del medidor y sus significados.

1 Configuración del medidor


Encienda el medidor

Mantenga presionado  hasta que aparezca la pantalla de bienvenida.

Utilice  o  para modificar cada configuración y presione  para confirmar.


Configure el idioma

Resalte el idioma deseado y presione .

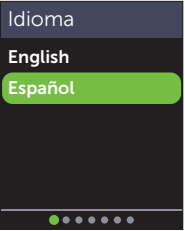

Opcional: Complete la configuración con la aplicación para dispositivos móviles OneTouch Reveal®*

Seleccione **Sí** para que la aplicación lo guíe por la configuración.

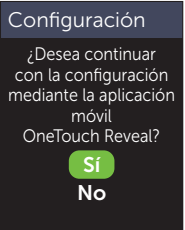


Descargue la aplicación para dispositivos móviles OneTouch Reveal® antes de emparejar el medidor y el dispositivo móvil.



* Visite **www.OneTouch.com** para conocer más sobre la aplicación para dispositivos móviles OneTouch Reveal®.

Configurar hora

Presione  si la hora es correcta o modifique y confirme.

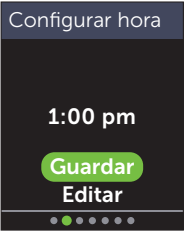


Configurar fecha

Presione  si la fecha es correcta o modifique y confirme.




Establezca los límites de rango a la hora de la comida

Presione  si los límites de rango preestablecidos para antes comer y desp. comer son correctos o modifique y confirme.

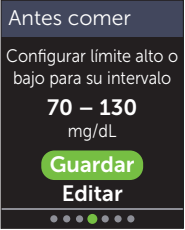

Configure el rastreo de pruebas

Presione  si la meta preestablecida es correcta o modifique y confirme.

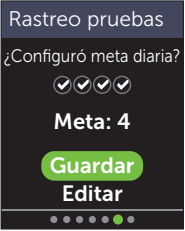

Configure la meta promedio de 90 días

Presione  si la meta promedio de 90 días es correcta o modifique y confirme.

NOTA: Hable con el profesional médico que lo atiende acerca de los límites de rango correctos, la meta de pruebas diarias y la meta promedio de 90 días para usted.

2 Realice una prueba


Lávese las manos con agua tibia y jabón, enjuague y seque antes de la extracción de muestra. Retire la tapa del dispositivo de punción; luego inserte una lanceta estéril. Gire la cubierta protectora. Vuelva a colocar la tapa en el dispositivo.



Inserte una tira reactiva (el lado dorado y las dos puntas plateadas orientadas hacia usted) para encender el medidor.



Puntas plateadas
Puerto de tiras reactivas

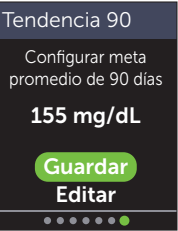

Ajuste la configuración de profundidad en el dispositivo de punción. Incline el dispositivo de punción y sosténgalo firmemente contra el lado de su dedo. Presione el botón de disparo. Apriete suavemente el dedo para extraer una gota de sangre.



Aplice la muestra de sangre al canal en cualquier lado de la tira reactiva. Una vez que el canal se llena, tomará un color rojo y el resultado aparecerá en aproximadamente 5 segundos.



La marca y los logotipos de **Bluetooth®** son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso por parte de LifeScan Scotland Ltd. de estas marcas está sometido a un acuerdo de licencias. Las otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

3 Mire su lectura

Indicador de rango dinámico ColorSure®

Su indicador de rango dinámico ColorSure® le permite saber instantáneamente si su lectura está por debajo (azul), por encima (rojo) o dentro (verde) de los límites de rango. También muestra cuando su lectura está cerca del extremo bajo o alto de su rango objetivo. Una nota de texto o un emoji señala un segmento en la barra de color.

Ejemplos de lecturas



Por debajo del rango

Extremo bajo del rango

Por encima del rango

Etiquetado de comidas y eventos


Una etiqueta antes comer (🍏) se aplicará automáticamente a su resultado. Usted puede cambiar la etiqueta de comidas a desp. comer (🍷) y agregar una etiqueta de evento.



Mensajes del Asesor de Glucemia (Blood Sugar Mentor™)

Los mensajes del Asesor de Glucemia (Blood Sugar Mentor™) proporcionan información sobre cómo le está yendo y asesoramiento sobre el control de la diabetes, incluidos mensajes educativos y motivacionales en función de sus resultados de glucosa actuales y anteriores y otros datos registrados.

Ejemplos de mensajes del Asesor de Glucemia (Blood Sugar Mentor™)

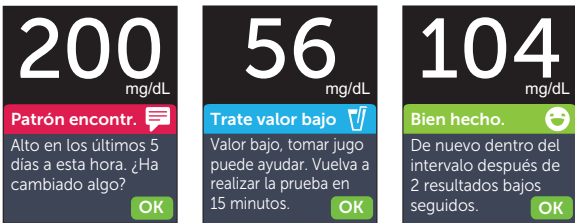

Información

Asesoramiento

Apoyo

Fabricado por:
LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Como su socio en el cuidado de la diabetes, lo invitamos a que se comunique con nosotros (disponible los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este) al 1 888 567-3003 (inglés), 1 888 567-3010 (español), o www.OneTouch.com.

Medidor Fabricado en China

© 2018–2022 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 07201303A
Fecha de revisión: 06/2022
OneTouch®



LifeScan

4 Conectar a un dispositivo móvil



La tecnología **Bluetooth®** le permite enviar de manera inalámbrica lecturas a un dispositivo móvil en el que puede usar la aplicación para dispositivos móviles OneTouch Reveal® para revisar y hacer gráficos de sus resultados, establecer metas de pruebas diarias, consultar los mensajes del Asesor de Glucemia (Blood Sugar Mentor™) y ayudar a identificar patrones.

En el menú Config., resalte **Bluetooth** y presione (OK).

Un ✓ determina si el **Bluetooth®** está actualmente encendido o apagado.

Presione (↶) o (↷) para cambiar el estado del **Bluetooth®** a encendido y presione (OK).

Cuando su dispositivo móvil se lo indique, ingrese el número de identificación personal (PIN).

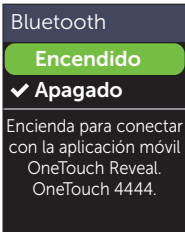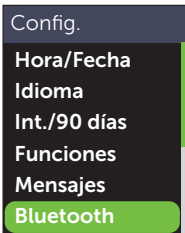

PIN de ejemplo

Registre su medidor o descargue el folleto del propietario en español support.onetouch.com



ONETOUCH
Verio Reflect®

Sistema de supervisión de glucosa en la sangre

Guía rápida de uso



AW 07201303A