

Registre su medidor o descargue el folleto del propietario en español [support.onetouch.com](http://support.onetouch.com)



## Guía rápida de uso

### Sistema de control de glucosa en la sangre OneTouch Ultra Plus Flex™

Utilice esta guía para conocer su medidor y siga los pasos descritos a continuación para poder comenzar.



**⚠ IMPORTANTE:** Lea el Manual del propietario que se suministró con su sistema.



AW 07295301A

### Uso recomendado

El sistema de control de glucosa en la sangre OneTouch Ultra Plus Flex™ está diseñado para utilizarse en la medición cuantitativa de glucosa (azúcar) en muestras de sangre completa capilar recién extraída de la yema del dedo.

El sistema de control de glucosa en la sangre OneTouch Ultra Plus Flex™ está diseñado para el autodiagnóstico fuera del cuerpo (uso para diagnóstico *in vitro*), en el hogar, por personas que padecen diabetes. Se utiliza para monitorear la eficacia del control de la diabetes.

### Limitaciones

El sistema de monitoreo de glucosa en la sangre OneTouch Ultra Plus Flex™ está diseñado para ser utilizado por un solo paciente y no debe compartirse. No se debe utilizar en varios pacientes. El sistema OneTouch Ultra Plus Flex™ no debe utilizarse para diagnosticar ni detectar diabetes, así como tampoco para uso neonatal. El sistema OneTouch Ultra Plus Flex™ no debe utilizarse en pacientes en estado crítico, pacientes en estado de shock, pacientes gravemente deshidratados ni pacientes hiperosmóticos (con o sin cetosis). **No** use el sistema OneTouch Ultra Plus Flex™ para pruebas en lugares alternativos (AST).

CONSULTE SU MANUAL DEL PROPIETARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LAS LIMITACIONES DE USO ADICIONALES.

# 1

## Establezca la fecha y la hora en su medidor

Enciéndalo

Presione y mantenga presionado hasta que aparezca la pantalla de inicio.

Utilice los botones para modificar cada configuración y presione para confirmar.

Configure la hora en la primera pantalla SET (Configurar)



- > La **Hora** estará intermitente. Presione si es correcto o modifique y confirme.
- > Los **Minutos** estarán intermitentes. Presione si es correcto o modifique y confirme.
- > **AM/PM** estará intermitente. Presione si es correcto o modifique y confirme.

Configure la fecha en la próxima pantalla SET (Configurar)

- > El **Año** estará intermitente. Presione si es correcto o modifique y confirme.
- > El **Mes** estará intermitente. Presione si es correcto o modifique y confirme.
- > El **Día** estará intermitente. Presione si es correcto o modifique y confirme.

Está listo para realizar una prueba

La configuración de su medidor estará completa en el momento en que aparezca la pantalla con 3 guiones.

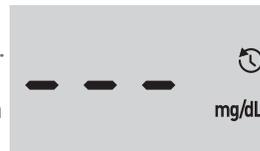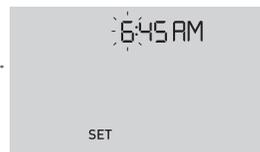

# 2


## Realice una prueba

Puntas plateadas



Puerto para las tiras reactivas


Inserte una tira reactiva (el lado azul y las 2 puntas plateadas orientadas hacia usted) para encender el medidor.

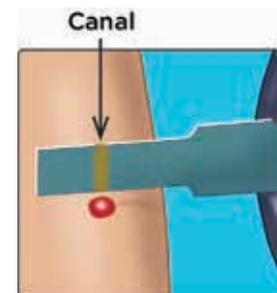

Aplique la muestra de sangre al canal en cualquier lado de la tira reactiva. Espere a que el canal se llene.



Aparecerá de forma intermitente la gota de sangre.

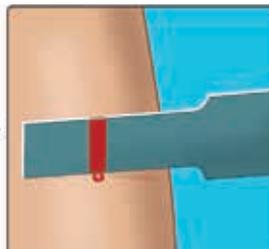

El canal toma un color rojo y el medidor cuenta regresivamente desde 5 hasta 1.

3

### Vea sus resultados



Ejemplo de un resultado Dentro del intervalo

Su resultado aparecerá en la pantalla. La flecha del indicador de intervalo apunta a la barra de colores del Indicador de intervalo azul, verde o rojo, para indicarle si su resultado está por debajo del límite bajo, dentro del límite o por encima del límite alto.



Ejemplo de un resultado Por debajo del intervalo



Ejemplo de un resultado Por encima del intervalo

4

### Opcional: conéctelo a un dispositivo móvil

Su medidor viene con tecnología **Bluetooth®**. Esto le permite enviar sus resultados de forma inalámbrica a su dispositivo móvil como, por ejemplo, a su teléfono o a su tableta, donde podrá verlos y graficarlos.

Para obtener más información sobre el uso de la función inalámbrica de su medidor y ver una lista completa de aparatos y aplicaciones de software compatibles, visite nuestro sitio en [www.OneTouch.com](http://www.OneTouch.com).

#### Cómo conectar su medidor

Presione **OK** y **▲** al mismo tiempo para encender y apagar la función **Bluetooth®**. Cuando su dispositivo móvil se lo indique, ingrese en su dispositivo el número de identificación personal (PIN) que le indica su medidor.



El símbolo **Bluetooth** significa que está encendida la función **Bluetooth®**.




Ejemplo de un número de identificación personal (PIN).

#### Símbolos del medidor

	Encendido del medidor		Función <b>Bluetooth®</b> encendida
	Batería baja		Modo historial (resultados anteriores)
	Batería agotada		Aplique la muestra
	Solución de control		Flecha del indicador de rango
	Sincronización	<b>SET</b>	Modo de configuración

### Acerca del indicador de rango

Su medidor viene con un indicador de rango que le permite comprobar automáticamente si su resultado está por debajo, por encima o dentro de los límites del rango. Los límites por encima y por debajo del intervalo que utiliza el indicador del intervalo están predeterminados de la siguiente manera:

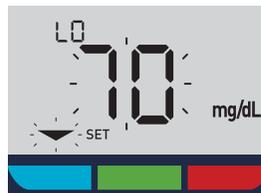

Límite por debajo del rango preestablecido



Límite por encima del intervalo preestablecido

Para obtener más información sobre cómo modificar los límites de rango preestablecidos que se adaptan a sus necesidades, consulte su Manual del propietario.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- Consulte la Guía del usuario o el Manual del propietario para obtener información importante sobre la limpieza y desinfección del medidor, el dispositivo de punción y las tapas.
- Después del uso y la exposición a la sangre, se considera que todas las partes de este kit implican un riesgo biológico. Un kit usado puede transmitir enfermedades infecciosas incluso después de que haya realizado la limpieza y la desinfección.

Para obtener más información, consulte: Aviso de Salud Pública de la FDA: "Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication" (2010) <http://wayback.archive-it.org/7993/2017011013014/> <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>.

Sitio web del CDC sobre "Infection Prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration" (Prevención de infecciones durante el control de glucosa en sangre y la administración de insulina) (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html>.

Como su socio en el cuidado de la diabetes, lo invitamos a que se comunique con nosotros (disponibles los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este) al 1 888 567-3003 (inglés), 1 888 567-3010 (español), o [www.OneTouch.com](http://www.OneTouch.com).

Medidor fabricado en China  
Consulte las instrucciones de uso.

Fabricado por:  
LifeScan Europe GmbH  
Gubelstrasse 34  
6300 Zug  
Switzerland

OneTouch®  
AW 07295301A

Fecha de revisión: 07/2022

© 2018–2022 LifeScan IP Holdings, LLC

**LifeScan**

La marca y los logotipos de **Bluetooth®** son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso por parte de LifeScan Scotland Ltd. de estas marcas está sometido a un acuerdo de licencias. Las otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.